


Functies van het bedieningspaneel

Functie	Toets
Status LED	1
Aan / uit schakelaar	2
Verlichtingsconfiguratie	3
Autofocus aan / uit	4
Zoom-instelling	5
Referentielijn / balk	6
Beeldmodus (Als u deze knop ingedrukt houdt, kunt u met knop 3 de verlichting aanpassen)	7
Artificiële kleuren	8

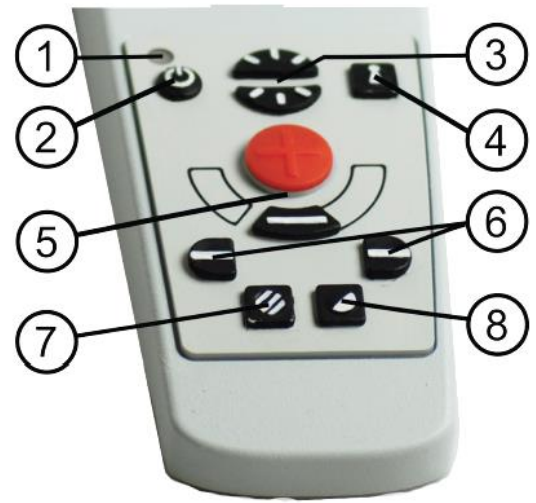

Windows sneltoetsen

Functie	Toets
Natuurlijke kleuren	F1
Positief beeld met verhoogd contrast	F2
Negatief beeld met verhoogd contrast	F3
Maak een momentopname	F5
Maak een momentopname (snel)	Shift + F5
Start / stop video-opname	Ctrl + F5
Start / stop video-opname (snel)	Ctrl + Shift + F5
Weergavemodus voor momentopnamen	F6
Toon direct de laatst gemaakte momentopname	Shift + F6
Weergavemodus voor video	Ctrl + F6
Direct afspelen van de laatst opgenomen video	Shift + Ctrl + F6
Vooraf ingestelde split-screen modus	F8
Venster informatie en instellingen weergeven	F9
Inzoomen	Pijltoets omhoog
Uitzoomen	Pijltoets omlaag
Verlagen lichtintensiteit / contrast	Pijltoets links
Verhogen lichtintensiteit / contrast	Pijltoets rechts
Geleidingslijn links / omhoog	Ctrl + pijltoets links
Geleidingslijn links / omlaag	Ctrl + pijltoets omhoog



Magnilink Student

Functie	Toets
Geleidingslijn rechts / omhoog	Ctrl + pijltoets rechts
Geleidingslijn rechts / omlaag	Ctrl + pijltoets omlaag
“Altijd op de voorgrond” activeren / deactiveren	Ctrl + A
Minimaliseer het programma naar de taakbalk	Ctrl + M
Camerabeeld met de klok mee roteren	Ctrl + R
Camerabeeld tegen de klok in roteren	Shift + Ctrl + R
Schermvergrotingsinterface activeren / deactiveren	Ctrl + C
Links / rechts spiegelen van het camerabeeld	Ctrl + I
Stilzetten van het camerabeeld (Freeze)	F
Autofocus fixeren	Ctrl + J

OCR functionaliteit (alleen voor MLS-CM03)

Functie	Toets
OCR-proces starten	F4
Schakelen tussen camera en tekstbeeld	V
Schakelen tussen weergavemodi	B
Start / pauze lezen	1
Stop lezen	2
Handmatig voorgaande tekst lezen	3
Handmatig volgende tekst lezen	4
Schakelen tussen leesmodus	5
Langzamer	6
Sneller	7
Volume verlagen	8
Volume verhogen	9
Wisselen van stem	0

In combinatie met SuperNova of ZoomText

Functie	Toets
Aanpassen breedte camerabeeld	Shift + pijltoets links / rechts
Aanpassen hoogte camerabeeld	Shift + pijltoets omhoog /omlaag